


# Trousse de prélèvement d'échantillons par frottis Aptima® Multitest

## Guide de procédures de prélèvement par la patiente

### Pour les écouvillons vaginaux

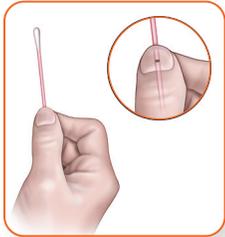

**Lavez-vous les mains avant de commencer. Si vous avez des questions au sujet de cette procédure, veuillez les poser à votre professionnel de la santé.**

Ouvrez partiellement l'emballage de l'écouvillon et retirez l'écouvillon. Ne touchez pas l'embout souple et ne déposez pas l'écouvillon. Si l'embout souple est touché, déposé ou échappé, jetez-le et obtenez une nouvelle trousse de prélèvement d'échantillons par frottis Aptima Multitest. **Tenez l'écouvillon en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon sur la ligne de repère.**



Insérez soigneusement l'écouvillon dans l'ouverture du vagin, à environ 5 cm (2 po), et faites-le **pivoter doucement pendant 10 à 30 secondes**. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin afin que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon. Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.



Tout en tenant l'écouvillon dans votre main, dévissez le bouchon du tube. Ne renversez pas le contenu du tube. Si le contenu du tube est renversé, demander une nouvelle trousse de prélèvement d'échantillons par frottis Aptima Multitest.



Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube de transport de manière à ce que la ligne de repère se trouve en haut du tube. Alignez la ligne de repère avec le bord supérieur du tube et brisez soigneusement la tige de l'écouvillon.



**Remarques : N'insérez PAS la ligne de repère sous le bord supérieur de la fiole. Ne poussez PAS l'écouvillon au fond de la fiole.**



Jetez la partie supérieure de la tige. Vissez fermement le bouchon sur le tube. Retournez le tube selon les instructions de votre professionnel de la santé.

**Des traductions du guide de collecte peuvent être disponibles. Veuillez consulter votre représentant Hologic pour tous les guides de collecte.**

Hologic fournit ce guide de procédure de collecte à titre d'outil d'information générale seulement; il ne s'agit pas de directives ou d'une garantie de fonctionnement. Il incombe exclusivement aux professionnels de la santé de lire et de comprendre la notice d'accompagnement appropriée et de se conformer aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux applicables.

**hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747**

Références : Trousse de prélèvement d'échantillons par frottis Aptima Multitest - Prélèvement par la patiente. Notice d'accompagnement AW-26254-001 pour les États-Unis. Hologic, Inc., 2022.

DS-01553-901 Rev. 007 © 2024 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, Aptima et les logos associés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Cette information est destinée aux professionnels de la santé aux États-Unis et dans d'autres marchés et ne doit pas avoir comme but de servir de sollicitation ou de promotion de produits lorsque de telles activités sont interdites. Puisque les documents Hologic sont distribués par l'intermédiaire de sites Web, de diffusions électroniques et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible de contrôler les circonstances lors desquelles sont partagés de tels documents. Pour des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays particulier, veuillez contacter votre représentant Hologic ou écrire à [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com).

