



Kit unisex de recolección de muestras de hisopado Aptima®

Guía del procedimiento de recolección del médico

Para muestras de hisopo endocervical femenino

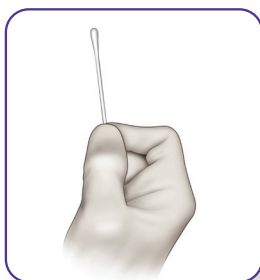


Utilice un hisopo de limpieza (hisopo blanco) para eliminar el exceso de mucosidad del orificio cervical y la mucosa circundante. Deseche este hisopo.

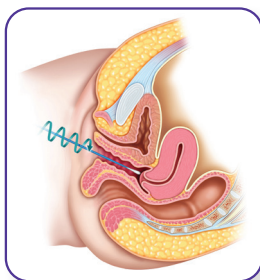

Inserte el hisopo de recolección (hisopo azul) en el canal endocervical. **Gire suavemente el hisopo en el sentido de las agujas del reloj durante 10 a 30 segundos.** Retire el hisopo; evite cualquier contacto con la mucosa vaginal. Si toca la punta blanda, apoya el hisopo o se le cae, deséchelo y obtenga un nuevo kit unisex de recolección de muestras de hisopado Aptima.



Mientras sujeta el hisopo con la mano, desenrosque la tapa del tubo. No derrame el contenido del tubo. Si se derrama el contenido del tubo, lo desecha y reemplaza con un nuevo kit unisex de recolección de muestras de hisopado Aptima.

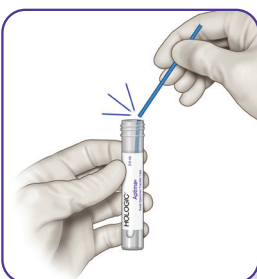

Coloque de inmediato el hisopo en el tubo de transporte, de modo tal que la línea quede en la parte superior del tubo.

Alinee la línea con el borde superior del tubo y parta cuidadosamente el mango.

Deseche la parte superior del mango.



Nota: NO inserte la línea por debajo del borde superior del vial. NO empuje el hisopo hacia el fondo del vial.



Enrosque la tapa bien ajustada al tubo.




Kit unisex de recolección de muestras de hisopado Aptima®

Guía del procedimiento de recolección del médico

Para muestras de hisopo uretral masculino

El paciente no debe orinar durante al menos 1 hora antes de la recolección de la muestra.

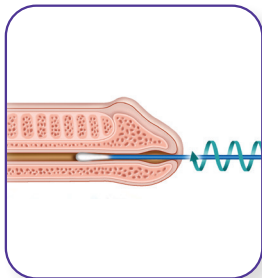


Deseche el hisopo de limpieza (hisopo blanco). NO es necesario para la recolección de muestras masculinas.

Inserte el hisopo para recolección de muestras (hisopo azul) de 2 cm a 4 cm en la uretra.

Gire suavemente el hisopo en el sentido de las agujas del reloj durante 2 o 3 segundos en la uretra. Retire el hisopo. Si toca la punta blanda, apoya el hisopo o se le cae, deséchelo y obtenga un nuevo kit unisex de recolección de muestras de hisopado Aptima.



Mientras sujeta el hisopo con la mano, desenrosque la tapa del tubo. No derrame el contenido del tubo. Si se derrama el contenido del tubo, lo desecha y reemplaza con un nuevo kit unisex de recolección de muestras de hisopado Aptima.

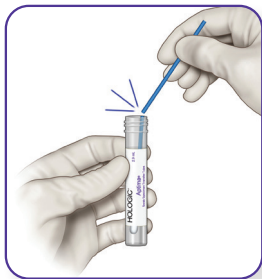

Coloque de inmediato el hisopo en el tubo de transporte, de modo tal que la línea quede en la parte superior del tubo.

Alinee la línea con el borde superior del tubo y parte cuidadosamente el mango. Deseche la parte superior del mango.



Nota: NO inserte la línea por debajo del borde superior del vial. NO empuje el hisopo hacia el fondo del vial.



Enrosque la tapa bien ajustada al tubo.

Hologic proporciona esta guía del procedimiento de recolección como una herramienta informativa general únicamente; no es una indicación afirmativa ni una garantía de cumplimiento. Es responsabilidad exclusiva del médico clínico/laboratorio leer y entender el prospecto apropiado, y cumplir con las normas y regulaciones locales, estatales y federales vigentes.

Referencia: Kit unisex de recolección de muestras de hisopado endocervicales y uretales masculinas Aptima. Prospecto para EE. UU. 502258-IFU-PI. Hologic, Inc.; 2021.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747

DS-01696-301 Rev. 007 © 2024 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, Aptima y los logotipos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de Hologic, Inc., o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. Esta información está destinada a los profesionales médicos de los EE. UU. y no tiene como fin ofrecer ni promocionar productos donde dichas actividades estén prohibidas. Dada la distribución de los materiales de Hologic a través de sitios web, retransmisiones electrónicas y exhibiciones comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre cuáles son los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante local de Hologic o escriba a diagnostic.solutions@hologic.com.

