

# Kit de recolección de muestras de orina Aptima®


## Guía del procedimiento de recolección

### Para muestras de orina de hombres y mujeres

*El paciente no debe orinar durante, al menos, 1 hora antes de la recolección de la muestra.*



Indique al paciente que proporcione el **primer chorro** de orina (alrededor de 20 ml a 30 ml del flujo de orina inicial) en el recipiente para recolección de muestras de orina. La recolección de volúmenes más grandes de orina puede tener como resultado la dilución de la muestra, lo que puede reducir la sensibilidad del análisis. Las pacientes de sexo femenino no deben limpiar la zona de los labios de la vulva antes de proporcionar la muestra.

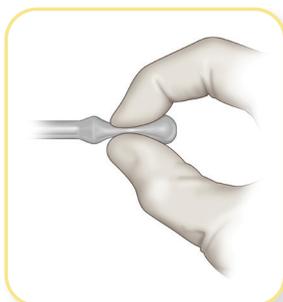

Retire la tapa y transfiera 2 ml de orina al tubo de transporte de muestras de orina usando la pipeta proporcionada.



Se ha añadido el volumen correcto de orina cuando el nivel de líquido está entre las líneas de llenado negras en la etiqueta del tubo de transporte de muestras de orina.



Deseche la pipeta. Enrosque la tapa bien ajustada al tubo. Esto ahora se conoce como “muestra de orina procesada”.



Hologic brinda esta guía del procedimiento de recolección como una herramienta informativa general únicamente; no es una indicación afirmativa ni una garantía de cumplimiento. Es responsabilidad exclusiva del médico clínico/laboratorio leer y entender el prospecto apropiado, y cumplir con las normas y regulaciones locales, estatales y federales vigentes.

[hologic.com](http://hologic.com) | [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com) | 1 888 484 4747

DS-01697-301 Rev. 001 © 2024 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, Aptima y los logotipos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de Hologic, Inc., o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países. Esta información está destinada a los profesionales médicos de los EE. UU. y no tiene como fin ofrecer ni promocionar productos donde dichas actividades estén prohibidas. Dada la distribución de los materiales de Hologic a través de sitios web, retransmisiones electrónicas y exhibiciones comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre cuáles son los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante local de Hologic o escriba a [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com).