

Набор для сбора мочи Aptima®

Руководство по процедуре сбора мочи у пациентов

Для сбора образцов мочи у женщин

Пациент не должен мочиться в течение как минимум 1 часа до сбора образца.



Вымойте руки водой с мылом.



Откройте крышку контейнера для сбора мочи и положите ее вверх дном.
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ пальцами к внутренней части контейнера.



НЕ ПРОТИРАЙТЕ наружное отверстие мочеиспускательного канала чистящей салфеткой.



Начните мочеиспускание в контейнер для сбора мочи.
Прекратите мочеиспускание, когда контейнер для сбора мочи заполнится приблизительно на 20–30 мл.
Не переполняйте контейнер.
Завершите мочеиспускание в унитаз.



Плотно закрутите крышку и не касайтесь внутренней части контейнера для сбора мочи.
Поместите контейнер в специально отведенное место или отдайте его медицинскому работнику.

Набор для сбора мочи Aptima®

Руководство по процедуре сбора мочи у пациентов

Для сбора образцов мочи у мужчин

Пациент не должен мочиться в течение как минимум 1 часа до сбора образца.



Вымойте руки водой с мылом.



Открутите крышку контейнера для сбора мочи и положите ее вверх дном.
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ пальцами к внутренней части контейнера.



НЕ ПРОТИРАЙТЕ наружное отверстие полового члена чистящей салфеткой.



Начните мочеиспускание в контейнер для сбора мочи.
Прекратите мочеиспускание, когда контейнер для сбора мочи заполнится приблизительно на 20–30 мл.
Не переполняйте контейнер.
Завершите мочеиспускание в унитаз.



Плотно закрутите крышку и не касайтесь внутренней части контейнера для сбора мочи.
Поместите контейнер в специально отведенное место или отдайте его медицинскому работнику.

Компания Hologic предоставляет данное руководство по процедуре взятия мазков только в качестве общего информационного материала; в нем не содержатся утвердительные инструкции или гарантии точности результатов. Врач/лаборатория несет единоличную ответственность за прочтение и понимание соответствующего листка-вкладыша и соблюдение действующих местных, региональных и федеральных правил и норм.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747

DS-09716-201, ред. 003 © Hologic, Inc., 2024 Все права защищены. Hologic, Aptima и связанные с ними логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Hologic, Inc. и/или ее дочерних компаний на территории США и/или других стран. Эта информация предназначена для медицинских работников в США и не предназначена для привлечения клиентов или продвижения продукции, если такая деятельность запрещена. Поскольку материалы Hologic распространяются через веб-сайты, онлайн-трансляции и отраслевые выставки, не всегда возможно контролировать место появления таких материалов. Для получения конкретной информации о том, какие продукты доступны для продажи в той или иной стране, обратитесь к местному представителю Hologic или напишите по адресу: diagnostic.solutions@hologic.com.