

Набір для взяття зразків сечі Aptima®

Посібник зі взяття зразків для пацієнтів

Для зразків сечі жінок

Пацієнтка не повинна мочитися протягом щонайменше 1 години до взяття зразка.



Вимийте руки водою з милом.



Зніміть кришку для взяття сечі та покладіть її догори дном на стільницю.
НЕ ТОРКАЙТЕСЯ внутрішньої поверхні чашки пальцями.



НЕ ОЧИЩУЙТЕ сечовий отвір серветкою.



Починайте сечовипускання в чашку для збору сечі.
Зупиніться, коли ємність для збору сечі заповниться приблизно на 20–30 мл.
Не переповнюйте чашку.
Завершіть сечовипускання в унітаз.



Щільно закрутіть кришку й уникайте торкання внутрішньої поверхні чашки для збору сечі.
Поставте чашку у спеціально відведене місце або передайте її медичному працівнику.

Набір для взяття зразків сечі Aptima®

Посібник зі взяття зразків для пацієнтів

Для зразків сечі чоловіків

Пацієнт не повинен мочитися протягом щонайменше 1 години до взяття зразка.



Вимийте руки водою з милом.



Зніміть кришку для взяття сечі та покладіть її догори дном на стільницю.
НЕ ТОРКАЙТЕСЯ внутрішньої поверхні чашки пальцями.



НЕ ОЧИЩУЙТЕ отвір пеніса серветкою.



Починайте сечовипускання в чашку для збору сечі.
Зупиніться, коли ємність для збору сечі заповниться приблизно на 20–30 мл.
Не переповнюйте чашку.
Завершіть сечовипускання в унітаз.



Щільно закрутіть кришку й уникайте торкання внутрішньої поверхні чашки для збору сечі.
Поставте чашку у спеціально відведене місце або передайте її медичному працівнику.

Компанія «Hologic» надає цей посібник зі взяття зразків лише як загальний інформаційний матеріал; він не є затвердженою інструкцією чи гарантією технічних характеристик. Відповідальність за ознайомлення та розуміння відповідного листка-вкладиша та дотримання застосованих місцевих, регіональних і федеральних правил та норм покладається виключно на лікаря-клініциста/лабораторію.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747

DS-09716-3961 Вер. 003 © 2024 Hologic, Inc. Усі права захищені. Hologic, Aptima та пов'язані з ними логотипи є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками компанії Hologic, Inc. та (або) її дочірніх компаній у США та (або) інших країнах. Ця інформація призначена для медичних працівників у США, а не для просування продукції там, де така діяльність заборонена. Оскільки матеріали компанії «Hologic» розповсюджуються через веб-сайти, електронні брошури та виставки, не завжди можливо контролювати, де знаходяться такі матеріали. Для отримання конкретної інформації про те, які продукти доступні для продажу в тій чи іншій країні, зверніться до місцевого представника відділу логістики або напишіть за адресою diagnostic.solutions@hologic.com.