


Protocolo de recolección con viales ThinPrep® con dispositivo similar a una escobilla

Guía de procedimientos de recolección del médico

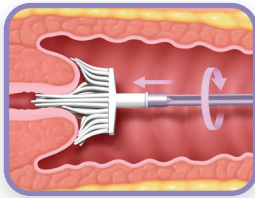

Obtenga una muestra adecuada del cuello uterino con un dispositivo tipo escobilla. Si lo desea, use agua tibia para calentar y lubricar el espéculo o aplique el lubricante de gel soluble en agua y sin carbómero con moderación en la hoja posterior del espéculo.^{1,2} Inserte las cerdas centrales de la escobilla en el canal endocervical lo suficientemente profundo como para permitir que las cerdas más cortas entren en contacto completamente con el ectocérvix. Empuje suavemente y gire la escobilla en el sentido de las agujas del reloj durante cinco giros completos de 360 grados.



Enjuague la escobilla lo más rápido posible en el vial de la solución PreservCyt® empujando la escobilla hacia el fondo del vial 10 veces para forzar la separación de las cerdas. Gire la escobilla **enérgicamente** para liberar más material.



Retire y deseche el dispositivo de recolección del vial.

No se debe dejar ningún dispositivo de recolección en el vial.



No desprendar el cabezal de la escobilla ni lo deje en el vial.



No recorte el cabezal de la escobilla ni lo deje en el vial.



Ajuste la tapa de manera que la línea de torque de la tapa sobrepase la línea de torque del vial.



Registre el nombre y el número de ID del paciente en el vial.

Registre la información y los antecedentes médicos del paciente en el formulario de solicitud de citología.



Ponga el vial y el formulario de solicitud en una bolsa para muestras para su transporte al laboratorio.

Consulte las instrucciones proporcionadas con el dispositivo de recolección para ver las advertencias, las contraindicaciones y las limitaciones asociadas con la recolección de muestras.

hologicwomenshealth.com

Hologic proporciona esta guía de referencia rápida ("guía") solo como herramienta de información general y no es una instrucción o garantía afirmativa. Aunque la información proporcionada en esta guía puede describir una técnica y/o protocolo en particular, no pretende ser una promoción ni un requisito por parte de Hologic para utilizar dicha técnica o protocolo. Es responsabilidad exclusiva del laboratorio determinar qué técnica y/o protocolo específicos se empleará. Los laboratorios que utilizan productos ThinPrep o PreservCyt deben leer y comprender las instrucciones de uso de cada producto y cumplir con las normas y regulaciones locales, estatales y federales correspondientes.

1. Cervicovaginal Cytology Based on the Papanicolaou Technique; Approved Guideline – Third Edition (Clinical and Laboratory Standards Institute GP15-A3). 2. Estudio interno de Hologic, datos de archivo.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | +1.781.999.7300

DS-05867-301 Rev. 003 © 2024 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, PreservCyt, ThinPrep y los logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas registradas de Hologic, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Esta información está destinada a los profesionales médicos de los EE. UU. y otros mercados, y no tiene como fin ofrecer ni promocionar productos donde tales actividades estén prohibidas. Dada la distribución de los materiales de Hologic a través de sitios web, retransmisiones electrónicas y exhibiciones comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre cuáles son los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante de Hologic o escriba a diagnostic.solutions@hologic.com.

ThinPrep®
PAP TEST