


# Protocolo de recolección con viales ThinPrep® con cepillo/espátula endocervical

## Guía de procedimientos de recolección del médico

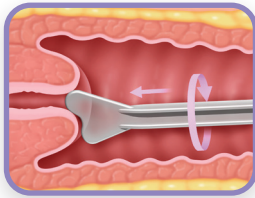

**Obtenga** una muestra adecuada del ectocervix con una espátula de plástico. Si lo desea, use agua tibia para calentar y lubricar el espéculo o aplique el lubricante de gel soluble en agua y sin carbómero con moderación en la hoja posterior del espéculo.<sup>1,2</sup> Seleccione el extremo contorneado de la espátula de plástico y gírela 360 grados alrededor de todo el ectocervix, manteniendo un contacto estrecho con la superficie ectocervical.



**Enjuague** la espátula lo antes posible en el vial de la solución PreservCyt® girando la espátula **enérgicamente** en el vial 10 veces.




**Retire y deseche** el dispositivo de recolección del vial.

**No se debe dejar ningún dispositivo de recolección en el vial.**



**NO** recorte el cabezal de la espátula ni lo deje en el vial.

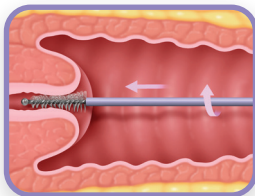

**Obtenga** una muestra adecuada del endocervix con un dispositivo de cepillo endocervical. Inserte el cepillo en el cuello uterino hasta que solo las cerdas de la parte más baja estén expuestas. Gire lentamente 1/4 o 1/2 vuelta en una dirección. **NO GIRE EL CEPILLO EN EXCESO.**



**Enjuague** el cepillo lo antes posible en la solución PreservCyt® girando el dispositivo en la solución 10 veces mientras lo presiona contra la pared del vial de PreservCyt®. Gire el cepillo **enérgicamente** para liberar más material.



**Retire y deseche** el dispositivo de recolección del vial.

**No se debe dejar ningún dispositivo de recolección en el vial.**



**No** recorte el cabezal del cepillo ni lo deje en el vial.



**Ajuste** la tapa de manera que la línea de torque de la tapa sobrepase la línea de torque del vial.



**Registre** el nombre y el número de ID del paciente en el vial.

**Registre** la información y los antecedentes médicos del paciente en el formulario de solicitud de citología.



**Ponga** el vial y el formulario de solicitud en una bolsa para muestras para su transporte al laboratorio.

**Consulte las instrucciones proporcionadas con el dispositivo de recolección para ver las advertencias, las contraindicaciones y las limitaciones asociadas con la recolección de muestras.**

[hologicwomenshealth.com](http://hologicwomenshealth.com)

Hologic proporciona esta guía de referencia rápida ("guía") solo como herramienta de información general y no es una instrucción o garantía afirmativa. Aunque la información proporcionada en esta guía puede describir una técnica o protocolo en particular, no pretende ser una promoción ni un requisito por parte de Hologic para utilizar dicha técnica o protocolo. Es responsabilidad exclusiva del laboratorio determinar qué técnica y/o protocolo específicos se empleará. Los laboratorios que utilizan productos ThinPrep o PreservCyt deben leer y comprender las instrucciones de uso de cada producto y cumplir con las normas y regulaciones locales, estatales y federales correspondientes.

1. Cervicovaginal Cytology Based on the Papanicolaou Technique; Approved Guideline – Third Edition (Clinical and Laboratory Standards Institute GP15-A3). 2. Estudio interno de Hologic, datos de archivo.

**hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | +1.781.999.7300**

DS-10288-301 Rev. 001 © 2024 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, PreservCyt, ThinPrep y los logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas registradas de Hologic, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Esta información está destinada a los profesionales médicos de los EE. UU. y otros mercados, y no tiene como fin ofrecer ni promocionar productos donde tales actividades estén prohibidas. Dada la distribución de los materiales de Hologic a través de sitios web, retransmisiones electrónicas y exhibiciones comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre cuáles son los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante de Hologic o escriba a [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com).

**ThinPrep®**  
PAP TEST