

Lista de recordatorio para el paciente



No tener relaciones sexuales durante 48 horas antes del examen.



Evitar los medicamentos vaginales, los lubricantes personales y las duchas vaginales 48 horas antes del examen.



Programar una cita 2 semanas después del primer día del último período menstrual de la paciente.

Escanee a continuación para acceder a los videos de recolección de la prueba de Papanicolaou y complete las guías de referencia rápida para cada dispositivo.



Escanear para descubrir más.



Hologic brinda esta guía del procedimiento de recolección como una herramienta informativa general únicamente; no es una indicación afirmativa ni una garantía de cumplimiento. Es responsabilidad exclusiva del médico clínico leer y entender el prospecto correspondiente, así como cumplir con las normas y regulaciones locales, estatales y federales vigentes.

Referencias 1. Citología cervicovaginal basada en la técnica de Papanicolaou; guía aprobada, tercera edición (GP15-A3 del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio [Clinical and Laboratory Standards Institute GP15-A3]). 2. Estudio interno de Hologic, datos de archivo. 3. Rovers Cervex-Brush Combi, Información de uso, 2010-11.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | +1.888.484.4747

PB-00803-301 Rev. 003 © 2024 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, PreservCyt, ThinPrep y los logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas registradas de Hologic, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Esta información está destinada a los profesionales médicos de los EE. UU. y otros mercados, y no tiene como fin ofrecer ni promocionar productos donde tales actividades estén prohibidas. Dada la distribución de los materiales de Hologic a través de sitios web, retransmisiones electrónicas y exhibiciones comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre cuáles son los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante de Hologic o escriba a diagnostic.solutions@hologic.com.

ThinPrep®
PAP TEST

Guía

DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA PAPANICOLAOU

Maximice el poder de la citología con la prueba de Papanicolaou ThinPrep y ayude a mejorar la atención de la paciente con esta guía integral para una recolección adecuada.



ThinPrep®
PAP TEST


Guía para el éxito con la prueba de Papanicolaou ThinPrep®

1

Preparar el espéculo^{1,2}

► Se prefiere usar agua tibia. ► Usar solo lubricantes sin carbómero. ► Cantidad del tamaño de una moneda.

Espéculo

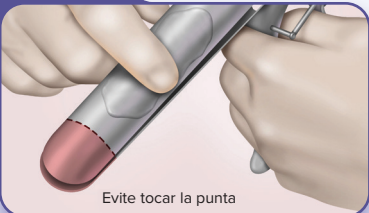

Si se desea lubricante, los siguientes lubricantes están aprobados para usarse para la prueba de Papanicolaou ThinPrep®.

Lubricante	Fabricante
✓ Gel lubricante para prueba de Papanicolaou	Aseptic Control Products
✓ Lubricante quirúrgico SurgiLube	HR Pharmaceuticals
✓ CerviLube	Sion Biotext

Comuníquese con el distribuidor de suministros médicos para obtener detalles de compra.


2

Obtener la muestra

► Se debe girar según las pautas del fabricante. ► No se debe girar excesivamente.

A

Recolección del médico con un dispositivo tipo escobilla

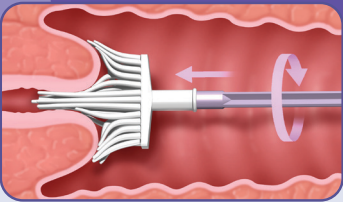

Inserte la cerda central de la escobilla en el canal endocervical lo suficientemente profundo como para permitir que la cerda más corta entre en contacto completamente con el ectocérvix.


Gire en sentido horario

360°
5 veces

Empuje suavemente y gire la escobilla en el sentido de las agujas del reloj durante cinco giros completos de 360 grados.

B


Recolección del médico con el dispositivo espátula/cepillo

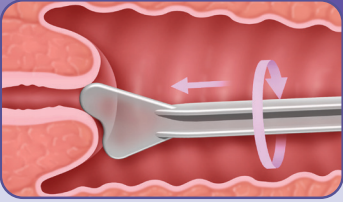

Seleccione el extremo contorneado de la espátula de plástico y gírela 360 grados alrededor de todo el ectocérvix, manteniendo un contacto estrecho con la superficie exocervical.

Gire el extremo contorneado

360° 1 vez

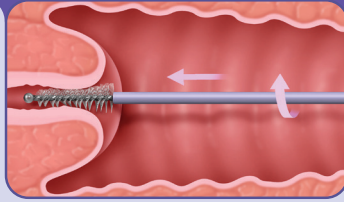


Inserte el cepillo en el cuello uterino hasta que solo las cerdas de la parte más baja estén expuestas. Gire lentamente 1/4 o 1/2 vuelta en una dirección.

Gire en una dirección

1/4 a 1/2

C

Recolección del médico con el dispositivo Cervex-Brush® Combi de Rovers®

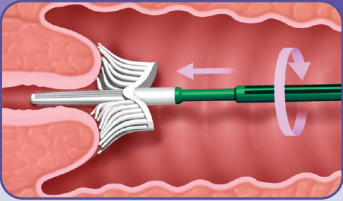

Inserte la parte del recolector de muestras endocervical del dispositivo en el canal endocervical lo suficientemente profundo como para permitir que las otras cerdas entren en contacto directo con el exocérvix.

Gire en sentido horario

360°
2 veces

Empuje suavemente y gire la escobilla en el sentido de las agujas del reloj 2 veces durante 2 giros completos de 360 grados.³

3

Enjuagar el dispositivo elegido de inmediato

► Recolección sanitaria: los dedos deben permanecer en la manija, no en el cepillo

El proceso de recolección ThinPrep® preserva y fija las células en la solución, no en el cabezal del dispositivo.

A

Tipo escobilla



Empuje la escobilla hacia el fondo del vial 10 veces, forzando la separación de las cerdas.

B

Espátula



Agite la espátula vigorosamente en el fondo del vial 10 veces.

B

Cepillo



Rote el cepillo en la solución 10 veces mientras lo presiona contra la pared del vial PreservCyt®.

C

Cervex-Brush® Combi de Rovers®



Empuje el dispositivo Cervex-Brush® Combi de Rovers® hacia el fondo del vial 10 veces, forzando la separación de las cerdas.

Agite el dispositivo de recolección elegido vigorosamente para liberar más material.

4

Retirar y desechar el dispositivo de recolección


A

Tipo escobilla





No desprenda el cabezal de la escobilla.

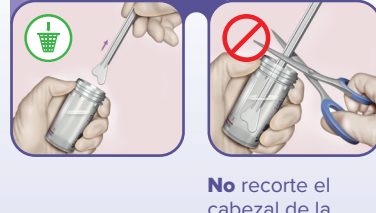



No recorte el cabezal de la escobilla.






No recorte el cabezal de la escobilla.

B

Espátula/cepillo

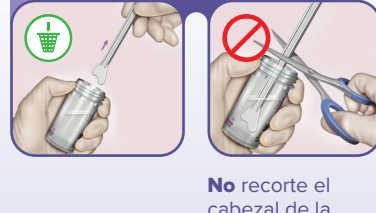




No recorte el cabezal de la espátula.





No recorte el cabezal de la espátula.

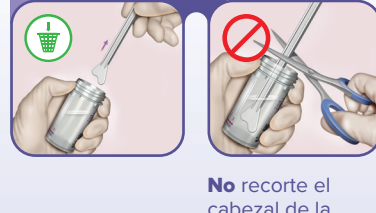



No recorte el cabezal de la espátula.


C

Cervex-Brush® Combi de Rovers®





No desprenda el cabezal del dispositivo Rovers.

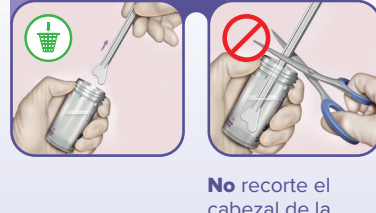



No desprenda el cabezal del dispositivo Rovers.





No desprenda el cabezal del dispositivo Rovers.

No se debe dejar ningún dispositivo de recolección en el vial.